

Gebrauchsanweisung!
Bitte aufmerksam lesen!




**Ohne Zink,
ohne Konservierungs-
stoffe**

Sicherheit für die Dritten. Protefix®

Protefix® Haft-Creme PREMIUM

Extra-Stark mit Nass-Haftkraft und Langzeitwirkung

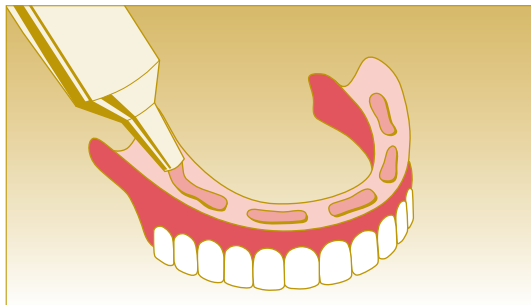

Premium-Rezeptur: Ohne Zinksalz, ohne Konservierungsstoffe. Auch für Teilprothesen geeignet.


Anwendung:

Haft-Creme zum Auftragen auf Zahnprothesen.

Dosierung und Art der Anwendung:

Tagesdosis: Bis zu 0,8 g Haft-Creme.

Prothese und Mundschleimhaut von Rückständen reinigen und **Protefix® Haft-Creme PREMIUM** in Abständen dünn auf die nasse Prothese auftragen (in die Vertiefung der Ober- oder Unterkieferprothese, die dem Kiefer später aufliegt). Bei Bedarf können Sie auch den hinteren Teil der Gaumenplatte an der Oberkieferprothese mit einem Streifen **Protefix® Haft-Creme PREMIUM** versehen. Setzen Sie die Zahnprothese dann ein und drücken Sie sie einige Sekunden lang fest an den Kiefer.

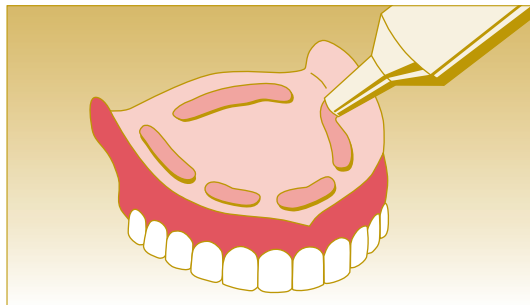

Warten Sie ca. 5 Minuten, bevor Sie Nahrung zu sich nehmen. Dosieren Sie die **Protefix® Haft-Creme PREMIUM** sparsam, da bei einer Überdosierung die Haftung Ihrer Prothese beeinträchtigt werden kann.

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Nicht bei verletzter oder erkrankter Mundschleimhaut anwenden.

Nebenwirkungen:

In Einzelfällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen an der Mundschleimhaut oder auch des Gesamtorganismus nicht auszuschließen. Bei Verdacht auf Vorliegen einer Überempfindlichkeitsreaktion nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Arzt auf. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden Nebenwirkungen sind dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde zu melden.



Achtung! Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Die Anwendung der Haft-Creme sollte nur zeitweilig erfolgen. Lassen Sie den Sitz Ihrer Prothese regelmäßig überprüfen.
- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
- Um ein Ausölen der Haft-Creme zu verhindern, Tube vor dem Gebrauch gut durchkneten.
- Nach Gebrauch die Tube sorgfältig verschließen, die Öffnung dabei sauber und trocken halten, da das Eindringen von Flüssigkeit zur Verhärtung der Haft-Creme führen kann.
- Haftmittlrückstände lassen sich leicht mit einem speiseölgetränkten Wattebausch entfernen.

Zusammensetzung:

Protefix® Haft-Creme PREMIUM enthält:

Cellulose Gum (27 %), Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer (26 %), Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Silica, Chamomilla Recutita, Tocopheryl Acetate, Commiphora Myrrha, Salvia Officinalis, Menthyl Lactate, Mentha Crispa, CI 14720.

Diese Gebrauchsanweisung wurde zuletzt überarbeitet im 09/2019.



Queisser
PHARMA
GmbH & Co. KG
Schleswiger Straße 74
24941 Flensburg
Deutschland
www.queisser.de



Protefix® Haft-Creme **PREMIUM**

Extra-Stark mit Nass-Haftkraft und Langzeitwirkung

7-fach Effekt

Nass-Haftkraft
Extra-Stark
Pflegefaktor
Krümelschutz
Tragekomfort
Kräuterkraft
Milde Frische

- 1. Nass-Haftkraft:** Direkt auf die feuchte Prothese auftragbar
- 2. Extra-Stark:** Prothesenhaftung mit Langzeitwirkung
- 3. Pflegefaktor:** Vitamin E schützt die Zellen
- 4. Krümelschutz:** Effiziente Randabdichtung gegen Eindringen von Speiseresten unter die Prothese
- 5. Tragekomfort:** Dank elastischer Polsterung zwischen Zahnfleisch und Prothese
- 6. Kräuterkraft:** Mit Myrrhe-/Salbei-/Kamille-Formel
- 7. Milde Frische:** Angenehm mild-frischer Minzgeschmack

Protefix® Haft-Creme **PREMIUM**

wirkt sofort und langanhaltend und sorgt für ein natürliches, sicheres Tragegefühl der Dritten, selbst bei schwierigen Haft-Problemen.

Ihre Meinung liegt uns am Herzen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen, dann schreiben Sie uns bitte. Gerne möchten wir uns um Ihre Wünsche kümmern. Mit der Beantwortung der folgenden Fragen helfen Sie mit, dass wir uns in Zukunft optimal auf die Bedürfnisse der Verwender von **Protefix®** Produkten einstellen können. Selbstverständlich sind alle Angaben freiwillig. Die Daten werden nicht für andere Zwecke an Dritte weitergegeben. Weitere umfangreiche Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten in Verbindung mit diesem Beipackzettel finden Sie hier: <https://www.queisser.de/datenschutz/bpz>

Wenden Sie sich bei Fragen gerne an uns: Queisser Pharma GmbH & Co. KG, Schleswiger Str. 74, 24941 Flensburg, E-Mail: info@queisser.de, www.queisser.de. Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns herzlich!

Wie haben Sie **Protefix®** kennengelernt?

- ☐ Apotheker ☐ Bekannte
☐ Zahnarzt ☐ Werbung

Warum verwenden Sie Haft-Creme?

- ☐ bei mir hält nichts anderes
☐ weil die Prothese sicher und lange haftet
☐ weil ich die Haft-Creme direkt auf die nasse Prothese auftragen kann

Ihre persönlichen Daten

Name _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Telefon _____ E-Mail _____

☐ Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine o.a. Daten für Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen sowie für Zwecke der Kundenbefragung durch die Queisser Pharma GmbH & Co.KG verwendet werden. Ich kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Telefonnummer nutzen wir nur im Falle einer Reklamationsbearbeitung, um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen.

Weitere Informationen unter: www.protefix.de

Sind Sie zufrieden mit **Protefix® Haft-Creme **PREMIUM?****

- ☐ Ja ☐ Nein, weil _____

Verwenden Sie noch andere **Protefix®** Produkte?

- ☐ Ja, und zwar _____
☐ Nein

Ich bin _____ Jahre alt und verwende **Protefix®** Haft-Creme **PREMIUM** seit _____.