



mosquito® Insekten-Stichheiler

Funktionsprinzip

Der Insekten-Stichheiler ist ein Medizinprodukt zur Linderung von Juckreiz und Schmerzen bei Insektenstichen oder -bissen, beispielsweise durch Mücken, Bremsen, Wespen und Bienen.

Das Wirkprinzip basiert auf der lokalen Erwärmung der betroffenen Hautstelle auf ca. 50 °C für wenige Sekunden („lokale Hyperthermie“). Die Behandlung ist sowohl unmittelbar nach dem Stich als auch bei späterem Auftreten von Symptomen möglich.

- Wirkt mit konzentrierter Wäre ohne chemische Stoffe
- Ergonomisches Design für eine gezielte Behandlung der Einstichstelle
- Mit 2 Anwendungszeiten (3 bzw. 6 Sekunden)

Anwendung

Einfach das Gerät mit dem Heizplättchen auf die Einstichstelle setzen. Für eine 3-sekündige Anwendung (z. B. bei Erstanwendung oder bei empfindlicher Haut) den Aktivierungsknopf einmal, für eine 6-sekündige Anwendung zweimal kurz hintereinander drücken. Nach erfolgter Behandlung erfolgt ein akustisches Signal.

Hinweise

- Bienenstachel vor der Anwendung entfernen
- Zur Anwendung bei Kindern ab 3 Jahren

ACHTUNG

- Das Gerät nicht auf bereits geschädigter Haut (z. B. bei Sonnenbrand) oder auf Wunden verwenden.
- Nicht bei gleichzeitiger lokaler Anwendung von Salben und Cremes verwenden.
- Personen mit dauerhaft oder temporär reduzierter thermischer Empfindlichkeit der Haut (z.B. Polyneuropathie) dürfen das Gerät nicht benutzen.
- Bei empfindlichen Personen kann eine kurzzeitige Hautrötung nach der Anwendung auftreten. In seltenen Fällen kann es zu Hautreizungen kommen.

mosquito®
Insekten-Stichheiler
PZN 19134140
Best.-Nr. 044157



PZN - 19134140



WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG
56204 Hüllscheid
www.wepa-apothekenbedarf.de

www.mosquito-parasitenschutz.de