



HYLO DUAL INTENSE®

Befeuchtende Augentropfen



HYLO DUAL INTENSE®: Die Intensivtherapie für trockene Augen

- Bei chronisch trockenen und gereizten Augen mit entzündlicher Symptomatik
- Duales Wirkprinzip mit 0,2 % Hyaluronsäure und 2,0 % Ectoin
- Intensive Befeuchtung und langanhaltende Linderung entzündlicher Symptome
- Stabilisiert den Tränenfilm und schützt die Augenoberfläche nachhaltig vor erneuter Austrocknung
- Unterstützt die körpereigene Barrierefunktion gegen entzündliche Reize
- Frei von Konservierungsmitteln und Phosphaten

Langanhaltender Schutz für trockene und gereizte Augen

HYLO DUAL INTENSE® spendet chronisch trockenen und gereizten Augen mit entzündlichen Symptomen nachhaltige Feuchtigkeit. Die Kombination aus hochkonzentrierter Hyaluronsäure und Ectoin stabilisiert den Tränenfilm und schützt das Auge langanhaltend vor Reizungen und erneuter Austrocknung. Anhaltende, stärkere und sogar chronische Beschwerden werden dadurch effektiv gelindert. Wie alle HYLO®-Produkte sind auch die HYLO DUAL INTENSE® Augentropfen frei von Konservierungsmitteln und Phosphaten. Das patentierte COMOD® System garantiert eine hohe Ergiebigkeit (mind. 300 Tropfen pro Flasche) und lange Haltbarkeit von 6 Monaten.

Intensive Befeuchtung durch Hyaluronsäure und Ectoin

Mit 0,2 % enthalten HYLO DUAL INTENSE® Augentropfen eine besonders hohe Konzentration an hochwertiger Hyaluronsäure und sind damit hochviskos. Das bedeutet, dass die Tropfen besonders gut auf der Augenoberfläche haften und so das Auge intensiv und nachhaltig mit einem stabilen Feuchtigkeitsfilm versorgen. Ectoin besitzt ebenfalls hervorragende wasserbindende Eigenschaften und stabilisiert die fetthaltige Phase des Tränenfilms. Die Kombination der beiden Stoffe lindert umgebungsbedingte Reizungen, die zu entzündlichen Symptomen führen, sowie die für trockene Augen typischen Symptome Juckreiz und Brennen.

Schritt 1



Vor dem Gebrauch Schutzkappe abnehmen.

Schritt 2



Flasche mit der Tropferspitze nach unten halten. Legen Sie den Daumen auf die Flaschenschulter, die anderen Finger auf den Flaschenboden.

Schritt 3



Stützen Sie die Hand mit der Flasche mit der anderen Hand leicht ab.

Schritt 4



Neigen Sie den Kopf leicht nach hinten und ziehen mit der anderen Hand das untere Augenlid leicht herab. Üben Sie kräftigen Druck auf den Flaschenboden aus und träufeln den Tropfen in den Bindehautsack. Dank des speziellen COMOD® Pumpsystems tritt genau 1 Tropfen aus. Schließen Sie das Auge langsam, um die Flüssigkeit auf der Augenoberfläche zu verteilen. Nach Gebrauch die Tropferspitze sofort mit der Kappe verschließen.




SCHÄDIGENDE UMWELTREIZE

Trockene Augen und damit einhergehende Symptome wie juckende und brennende Augen sind in vielen Fällen auf schädliche Einflüsse von außen zurückzuführen. Trockene Raumluft durch Heizung und Klimaanlage, lange Arbeitszeiten am Bildschirm und die intensive Nutzung digitaler Medien an Smartphone und Tablet, Tabakrauch, Ozon und Autoabgase können sich negativ auf die Produktion der Tränenflüssigkeit, bzw. die Benetzung der Augenoberfläche auswirken und die empfindliche Hornhaut und Bindehaut reizen.



CHRONISCH TROCKENE AUGEN

Treten die Symptome von trockenen Augen kontinuierlich auf, sind Betroffene oftmals auf Augentropfen angewiesen. Hierbei ist eine intensive und langanhaltende Befeuchtung der Augen sehr wichtig, um nicht ständig zu den Augentropfen greifen zu müssen. HYLO DUAL INTENSE® hilft als hoch viskoses Mittel, das lange am Auge verbleibt und nachhaltig lindert.

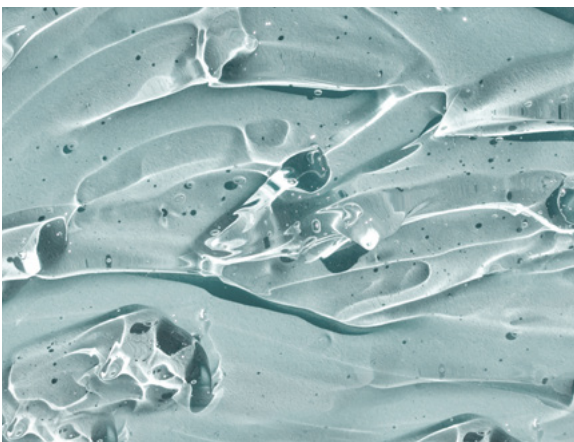

AUGENBEFEUCHTUNG MIT SYSTEM

Die HYLO® Produktfamilie ist die Nr. 1 in Deutschland, wenn es um trockene Augen geht.* Das vielseitige Sortiment bietet für jedes Stadium des trockenen Auges das geeignete Produkt – zur gelegentlichen Befeuchtung ebenso wie bei Beschwerden durch Entzündungen oder chronische Formen des trockenen Auges. Alle Augentropfen werden im patentierten COMOD® System angeboten und sind frei von Konservierungsmitteln und Phosphaten. Damit sind die Medizinprodukte besonders gut verträglich und sehr ergiebig.

*Abverkauf Total (EH) der HYLO® Produktfamilie; IH Galaxy: APO Channel Monitor; S01K1: MAT 2020.12

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN:

Wie oft sollten HYLO DUAL INTENSE® Augentropfen angewendet werden?

HYLO DUAL INTENSE® versorgt chronisch trockene und gereizte Augen mit entzündlichen Symptomen nachhaltig mit Feuchtigkeit. Die Dosierung der Augentropfen sollte gemäß der Empfehlung Ihres Augenarztes erfolgen. Im Allgemeinen tropfen Erwachsene und Kinder über 6 Jahren 3-mal täglich je 1 Tropfen HYLO DUAL INTENSE® in das Unterlid jeden Auges. Bei stärkeren Beschwerden können die Augentropfen auch häufiger am Tag angewendet werden. Während Schwangerschaft und Stillzeit und bei Kindern unter 12 Jahren sollte HYLO DUAL INTENSE® jedoch nicht öfter als 10-mal am Tag angewendet werden.

Kann ich HYLO DUAL INTENSE® auch längerfristig anwenden?

HYLO DUAL INTENSE® befeuchtende Augentropfen mit Ectoin sind für eine Daueranwendung geeignet. Aufgrund des Verzichts auf Konservierungsmittel und Phosphate sind die Augentropfen auch bei längerfristiger Anwendung gut verträglich. Wie bei allen Erkrankungen sollten Sie bei länger anhaltenden Beschwerden Ihren Augenarzt um Rat fragen.

Eignen sich HYLO DUAL INTENSE® Augentropfen auch zur Verwendung mit Kontaktlinsen?

Nein, aufgrund der hochviskosen (zähflüssigen) Konsistenz sollte HYLO DUAL INTENSE® nicht während des Tragens von Kontaktlinsen angewendet werden. Stattdessen empfiehlt sich für Kontaktlinsenträger bei stärkeren Beschwerden durch trockene Augen zum Beispiel die Anwendung von HYLO GEL® Augentropfen.

Kann es nach dem Eintropfen von HYLO DUAL INTENSE® zu einer Sehbeeinträchtigung kommen?

Aufgrund der Viskosität der Wirkstoff-Kombination aus Hyaluronsäure und Ectoin ist unmittelbar nach der Anwendung von HYLO DUAL INTENSE® ein vorübergehendes Schleiersehen möglich. In dieser Zeit sollten Sie nicht Auto fahren oder aktiv am Straßenverkehr teilnehmen.